

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns zu folgenden Fragen ein kurzes Feedback geben:

Was hat Ihnen an unserem Produkt/Service besonders **gut gefallen**?

Was hat Ihnen an unserem Produkt/Service **nicht gefallen**? Was können wir besser machen?

Unabhängig von unserem Produkt/Service, welche Produkte oder Dienstleistungen hätten Sie sich während Ihrer Genesung noch gewünscht?

Wie zufrieden waren Sie mit unserem Produkt?

sehr zufrieden zufrieden geht so unzufrieden sehr unzufrieden

Wie zufrieden waren Sie mit unserem Service?

sehr zufrieden zufrieden geht so unzufrieden sehr unzufrieden

Haben Sie unser Produkt/Service an Freunde, Bekannte oder Ärzte weiterempfohlen?

Ja Nein, mache ich aber noch Nein

Angaben zu Ihrer Person:

Männlich Weiblich

Wie alt sind Sie? _____

Welchen Beruf üben Sie aus? _____

Bitte legen Sie den ausgefüllten Fragebogen bei der Rücksendung des CAMO[®]ped dem Paket bei.

Vielen Dank!

Wir werden Ihre Angaben vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben.



INFORMATION

Sehr geehrte Patientin,
Sehr geehrter Patient,

Ihr behandelnder Arzt hat Ihnen CAMOped für die jetzt anstehende erste Rehabilitationsphase verordnet. In den ersten Wochen nach Ihrer Operation legen Sie die Grundlagen für die einwandfreie Funktion und die sensible Kontrolle Ihres Knies durch Ihre Muskulatur.

Dabei hilft Ihnen neben den anderen Therapiemaßnahmen das moderne und vielfach bewährte Therapiegerät CAMOped.

Warum aktive Therapie mit CAMOped?

Viele Bereiche Ihres Kniegelenkes sind mit kleinen Messfühlern, so genannten Rezeptoren ausgestattet. Diese Rezeptoren gewährleisten, dass Gelenkstellungen, Bewegungen, Kräfte wahrgenommen werden und steuern damit Ihre Muskelaktivitäten.

Durch die Verletzungen wurden diese Rezeptoren zum Teil in ihrer Funktion stark beeinträchtigt.

Auch die Operation Ihres Kniegelenkes führt im ersten Moment zu einer weiteren Schädigung der Rezeptoren.



Das Üben mit dem CAMOped bewirkt, dass diese Funktion von anderen Rezeptoren übernommen werden und ihrer Aufgabe, der abgestimmten Steuerung der Muskulatur, wieder mehr und mehr gerecht werden. Im Einzelnen führt dies dazu, dass

- Sie das Gefühl für Bewegungen Ihres Knies wiedererlangen
- Ihr Knie die Beweglichkeit zurückgewinnt und erhält
- Das Zusammenspiel der verschiedenen Muskelgruppen zur Stabilisierung des Gelenks optimiert wird
- Sie die Koordination und natürliche Steuerung Ihrer Muskulatur wieder erlernen
- der Abbau von Muskelsubstanz verhindert wird und die Kraft von Beuge- und Streckmuskulatur in einem ausgeglichener Verhältnis bleibt

Wie soll ich üben?

Setzen Sie sich für das Training mit dem CAMOped am besten auf den Boden oder auf eine Liege. Üben Sie zunächst in der Rückenlage (Abb. 1) und wechseln Sie später die Ausgangsstellung, indem Sie im Langsitz (Abb. 2) üben (so wird die rückseitige Oberschenkelmuskulatur gleich etwas gedehnt). Wenn Sie sich dabei mit dem Rücken anlehnen, fällt Ihnen das Ganze noch leichter.

Einzelheiten zum Gebrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung oder lassen Sie sich den Einsatz auf der Internetseite www.camoped.com als Video demonstrieren. Bitte sprechen Sie die genauen Belastungs- und Bewegungsmerkmale mit Ihrem behandelnden Arzt ab. Er weiß,

welche Dosierung erforderlich ist. Die Bewegungstherapie mit CAMOped ist eine Krankenkassenleistung, keine individuelle Gesundheitsleistung. Ihre Krankenkasse übernimmt ggf. erst nach einer Einzelfallprüfung, zu der sie in jedem Fall verpflichtet ist, die Kosten. Wir helfen Ihnen gerne bei der Klärung der Kostenübernahme.

Unter der Tel.-Nr. 0 80 24/60 81 82-10 erreichen Sie Frau Brigitte Sander.

CAMOped ist ein Hilfsmittel für das Sie als gesetzlich pflichtversicherter Patient in der Regel 10,00 € Patientenzahlung leisten müssen.

Diese Rechnung geht Ihnen nach Bewilligung durch die Krankenkasse zu.



Abb. 1



Abb. 2

Rückgabe

Wie alle unsere Produkte, wird auch CAMOped in Deutschland gefertigt, ist wieder verwendbar und recyclebar. Wir stellen Ihnen dieses umweltfreundliche System mietweise zur Verfügung.

Bitte geben Sie das Produkt nach Ablauf der Behandlung zurück.

Sollten Sie CAMOped nicht zurückgeben, werden wir den Preis für dieses System in Rechnung stellen.

Rücksendung mit UPS-Rücksendeschein

Kleben Sie den UPS-Rücksendeschein auf den Karton, die Gebühr ist bereits bezahlt.

Geben Sie das Paket einem UPS-Fahrer mit, oder vereinbaren Sie eine kostenfreie Abholung durch UPS an Ihrer Haustür:

1. wählen Sie Tel. **0800 / 882 66 30** (kostenlos)
2. nach der ersten Ansage von UPS, drücken Sie die Taste "0"

3. nach der zweiten Ansage von UPS, drücken Sie die "2" und Sie werden direkt mit einem Mitarbeiter verbunden.

Haben Sie kein Tastentelefon oder wollen Sie keine Taste drücken, dann warten Sie bitte so lange, bis Sie automatisch mit einem UPS-Mitarbeiter verbunden werden.

Der Mitarbeiter nimmt den Auftrag entgegen. Beziehen Sie sich auf den Ihnen vorliegenden Rücksendeschein sowie die UPS-Kd.-Nr. 989412.


Weitere Fragen beantwortet Ihnen unser Service unter Tel. 0 80 24/60 81 82-10 gerne.

Hinweise zur Bedienung und weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.camoped.com.


Wir wünschen Ihnen eine gute Genesung.

Ihr OPED-Team

Hilfestellung zur Rücksendung des Systems

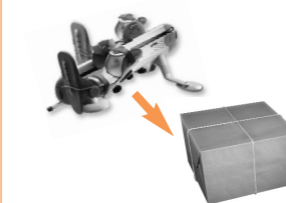

1. CAMO®ped verpacken.

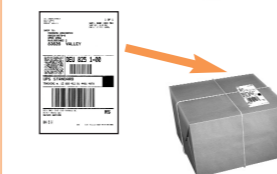

2. Rücksende-Etikett auf das Paket kleben. (siehe orangefarbener Pfeil)



3. UPS unter 0800-8826630 anrufen. OPED **Kd.-Nr. 989412** angeben.

Der Abholservice ist kostenlos.



4. UPS holt Paket ab.

Abholung unbedingt quittieren lassen!

